

Tipo Documento	Codice	Nome Documento	Data	Rev.
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi	DVR-GEN	GESTIONE DELL'EMERGENZA PEME BA EMERGENZA SARS-COV2 DPI	Maggio/2020	01



MASCHERINE MONOUSO



INDOSSARE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE MONOUSO

	<p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • I DISPOSITIVI SONO EFFICACI SOLAMENTE SE VENGONO INDOSSATI CORRETTAMENTE • DEVONO AVERE UNA BUONA TENUTA SUL VOLTO, PERCIÒ FARE ATTENZIONE E CURARE BARBA E BAFFI • INDOSSATA LA MASCHERA NON TOCCARE LA PARTE ESTERNA FINO AL MOMENTO DI RIMUOVERLA • EVITARE DI TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON MANI NON LAVATE • LAVARSI LE MANI PRIMA DI RIMUOVERE O DOPO TOCCATO LA MASCHERA PER QUALSIASI MOTIVO • CERCARE DI GESTIRE SOLO L'INTERNO O LE CORDE ELASTICHE • LAVARE NUOVAMENTE LE MANI DOPO AVER RIMOSSO LA MASCHERA • L'USO DELLE MASCHERINE DEVE ESSERE SEMPRE COMBINATO CON ALTRE AZIONI DI PREVENZIONE/IGIENE • SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON UNA NUOVA SE INEFFICIENTE O UMIDA • NON RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO: IN CASO D'URGENZA SANIFICARLE CON ALCOOL • CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E AL RIPARO DA FONTI DI CALORE • SU CONFEZIONE E PRODOTTO DEVE ESSERE RIPORTATO TIPOLOGIA E NUMERO DELLA NORMA TECNICA
<p>MASCHERINE FFP DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MARCATURA CE \ FDA EN 149:2009 CLASSE: FFP3 (30 TLV)</p> <p>CLASSE: FFP2 (10 TLV) KN95(GB2626-2006) N95 (NIOSH-42CFR84) SENZA VALVOLA ASPIRANTE</p>  <p>CLASSE: FFP1 (4 TLV) NON ADEGUATA</p>	<div> <div> <p>1 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI.</p>  </div> <div> <p>3 PORTARE LA MASCHERINA SUL VOLTO, LA BASE SUL MENTO E IL NASELLO SOPRA IL NASO, IN MODO DA COPRILO</p>  </div> <div> <p>5 TENENDO LA MASCHERINA SUL VOLTO, TIRARE L'ELASTICO INFERIORE E FARLO PASSARE DIETRO LA TESTA SOTTO LE ORECCHIE NELLA PARTE SUPERIORE DEL COLLO</p>  </div> <div> <p>7 PROVARE AD INSPIRARE E VERIFICARE CHE LA MASCHERINA ADERISCA PERFETTAMENTE (L'ARIA DOVREBBE ENTRARE SOLO ATTRAVERSO LA PARTE FILTRANTE)</p>  </div> </div> <div> <p>2 APPOGGIARE SUL PALMO DELLA MANO LA MASCHERINA E FAR PASSARE I LACCETTI SUL DORSO DELLA MANO (TENERE IL NASELLO RIVOLTO VERSO L'ALTO)</p>  </div> <div> <p>4 TENENDO LA MASCHERINA SUL VOLTO, TIRARE L'ELASTICO SUPERIORE E FARLO PASSARE DIETRO LA TESTA SOPRA LE ORECCHIE</p>  </div> <div> <p>6 CON ENTRAMBE LE MANI, AGGIUSTARE IL NASELLO AFFINCHÉ ADERISCA PERFETTAMENTE AL NASO</p>  </div> <div> <p>8 PER RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, ESEGUIRE LE STESSA OPERAZIONI AL CONTRARIO: TOGLIERE DA DIETRO SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE E LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI</p>  </div>
<p>MASCHERINE MEDICHE PRESIDIO SANITARIO (DPI)</p> <p>MARCATURA CE O AUTORIZZAZIONE ISS EN 14683:2019 EN 10993 TIPO: I (95 %) TIPO: II IIR (98 %) TIPO: III (98 %)</p> 	<div> <p>1 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI</p>  </div> <div> <p>2 CON ELASTICI AURICOLARI INSERIRE LE DITA ATTRAVERSO GLI ELASTICI AURICOLARI. LA CLIP PER IL NASO DEVE ESSERE DISPOSTA IN ALTO. SISTEMARE LA MASCHERA SUL NASO E SULLA BOCCA.</p>  </div> <div> <p>3 POSIZIONARE GLI ELASTICI INTORNO ALLE ORECCHIE. TIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA DALL'ALTO E DAL BASSO PER DISTENDERE COMPLETAMENTE LE PIEGHE. IN QUESTO MODO SI OTTIENE LA COPERTURA MASSIMA DEL VISO RIDUCENDO AL MINIMO GLI STRATI ATTRAVERSO CUI RESPIRARE.</p>  </div> <div> <p>4 MODELLARE LA BARRETTA PER IL NASO SUL PONTE DEL NASO PER RIDURRE AL MINIMO LE FUORIUSCITE DI ARIA</p>  </div> <div> <p>5 TOGLIERE DA DIETRO SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE E LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI</p>  </div> <div> <p>6 SMALTISCI CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO: PORRE LA MASCHERINA DA SOLA IN UN SACCHETTO DI PLASTICA, LEGATO E CHIUSO</p>  </div>

NESSUN DISPOSITIVO GARANTISCE LA SICUREZZA ASSOLUTA E LA PRECAUZIONE MIGLIORE È SEMPRE QUELLA DI MANTENERE L'ASSOLUTA IGIENE DELLE MANI E IL RISPETTO DELLA NECESSARIA DISTANZA DA ALTRE PERSONE.

DA FARE!!!

- ACQUISIRE DISPOSITIVI CONFORMI O AUTORIZZATI ISS
- LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO
- GARANTIRE UNA BUONA TENUTA SUL VOLTO
- SOSTITUIRE SE UMIDA, DANNEGGIATA O SPORCA

NON FARE !!!

- TOCCARE L'ESTERNO DELLA MASCHERA DURANTE L'USO
- RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO O SOVRAPPORLE
- LASCIARE SPAZI TRA IL VISO E DISPOSITIVO
- LASCIARE SCOPERTI BOCCA O NASO

Tipo Documento	Codice	Nome Documento	Data	Rev.
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi	DVR-GEN	GESTIONE DELL'EMERGENZA PEME BA EMERGENZA SARS-COV2 DPI	Maggio/2020	01






GUANTI MONOUSO



INDOSSARE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE MONOUSO

 <p>ATTENZIONE:</p>  <p>È OBBLIGATORIO MASCHERINA E GUANTI</p>	<p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • I DISPOSITIVI SONO EFFICACI SOLAMENTE SE VENGONO INDOSSATI CORRETTAMENTE • NON SOSTITUISCANO LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI DA ATTUARSI TRAMITE UN LAVAGGIO ACCURATO; • LAVARSI E ASCIUGARE LE MANI PRIMA DI INDOSSARE I GUANTI E DOPO AVERLI RIMOSSI • SOSTITUIRE OGNI VOLTA CHE SI SPORCANO O SONO LACERATI • COME LE MANI, NON DEVONO ESSERE MESSI A CONTATTO CON BOCCA NASO E OCCHI; • ELIMINARE CORRETTAMENTE NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AL TERMINE DELL'UTILIZZO: NON RIUTILIZZARE • SMALTIRE E CONFERIRE NEI CONTENITORI APPOSITI, CHIUSI ALL'INTERNO DI UN SACCHETTO <ul style="list-style-type: none"> – NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI SE NON ESPOSTI AL CONTAGIO DIRETTO – COME PRESIDIO SANITARIO SE ESPOSTI A CONTATTO MEDICO • L'USO DEI GUANTI DEVE ESSERE SEMPRE COMBINATO CON ALTRE AZIONI DI PREVENZIONE/IGIENE • INDOSSARE I GUANTI IMMEDIATAMENTE PRIMA DI ESEGUIRE LE ATTIVITÀ • EVITARE IL PIÙ POSSIBILE L'UTILIZZO CONTINUATIVO DELLO STESSO PAIO DI GUANTI • INDOSSARE IL GUANTO DELLA GIUSTA MISURA • CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E AL RIPARO DA FONTI DI CALORE • SU CONFEZIONE E PRODOTTO DEVE ESSERE RIPORTATO TIPOLOGIA E NUMERO DELLA NORMA TECNICA
<p>GUANTI NITRILE MARCATURA CE EN 420:2010 EN 374:2016</p>  <p>GUANTI LATTICE MARCATURA CE EN 420:2010 EN 374:2016 EN 388:2019</p>  <p>GUANTI VINILE MARCATURA CE EN 420:2010 EN 374:2016</p>  <p>EN ISO 374-5: 2016</p>  <p>VIRUS</p>	<div> <div>  <p>1</p> <p>PIZZICARE IL GUANTO AL POLSO • EVITARE DI TOCCARE LA PELLE</p> </div> <div>  <p>2</p> <p>SFILARE IL GUANTO</p> </div> </div> <div> <div>  <p>3</p> <p>TENERE IL GUANTO NEL PALMO DELLA MANO O GETTARLO VIA</p> </div> <div>  <p>4</p> <p>INFILARE LE DITA NEL SECONDO GUANTO • EVITARE DI TOCCARE L'ESTERNO DEL GUANTO</p> </div> </div> <div> <div>  <p>5</p> <p>SFILARE IL SECONDO GUANTO</p> </div> <div>  <p>6</p> <p>UNA VOLTA TOLTI ENTRAMBI I GUANTI, GETTARLI A RIFIUTO</p> </div> </div> <div> <p>• LAVARSI ACCURATAMENTE LE MANI</p> <p>• SMALTIRE CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO: PORRE IL GUANTO O LA MASCHERINA IN UN SACCHETTO DI PLASTICA, LEGATO E CHIUSO</p>   </div>

NESSUN DISPOSITIVO GARANTISCE LA SICUREZZA ASSOLUTA E LA PRECAUZIONE MIGLIORE È SEMPRE QUELLA DI MANTENERE L'ASSOLUTA IGIENE DELLE MANI E IL RISPETTO DELLA NECESSARIA DISTANZA DA ALTRE PERSONE.

 <p>LATTICE</p>  <p>NITRILE</p>  <p>VINILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GUANTI IN LATTICE GOMMA NATURALE ELEVATA ELASTICITÀ E RESISTENZA ALLA TRAZIONE ADERENTI, PERFORMANTI • GUANTI ANALLERGICI IN NITRILE CON OTTIMO ISOLAMENTO E ADERENZA PER MANIPOLAZIONE CHIMICA/ALIMENTI • GUANTI IN VINILE MENO RESISTENTI ALLO STRAPPO E ALLA PERFORAZIONE MA ECONOMICI, ANALLERGICO NON TALCATO
---	---

DA FARE!!!	NON FARE !!!
<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISIRE DISPOSITIVI CONFORMI O AUTORIZZATI ISS • LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO • INDOSSARE FINO A COPRIRE ANCHE IL POLSO 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUTILIZZARE I GUANTI MONOUSO O SOVRAPPORLI • ABBANDONARE A RIFIUTO NELL'AMBIENTE • USO DI GUANTI FUORI MISURA: SI ROMPONO E NON PROTEGGONO